



TMD Relief


2015-2016-2017
Patented solution (EU)

Dispositivo medico in Classe I non sterile e non di misura per l'esercizio dei muscoli della bocca.


REGOLAZIONE E SMALTIMENTO (ISTRUZIONI)

PROCEDURA DI REGOLAZIONE


Allentare i grani di serraggio.

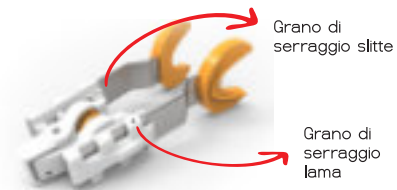

Portare a battuta i terminali delle lame.

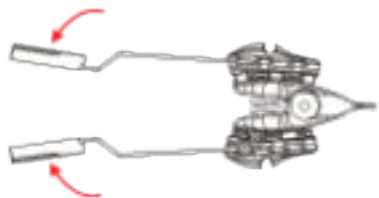

Tenere chiuso il dispositivo e regolare l'estensione delle lame per la regolazione forza/ampiezza spingendo dalla parte terminale.

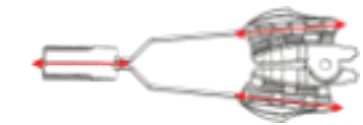

Se necessari diversi valori di ampiezza alla massima estensione, invertire il senso di uno o entrambe le slitte di supporto delle lame.






Serrare nuovamente i grani.



ATTENZIONE

Una errata regolazione può rendere inefficace l'esercizio.

Una errata regolazione della battuta di fine corsa può portare alla rottura delle slitte del dispositivo.

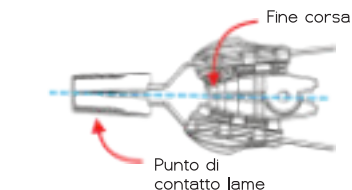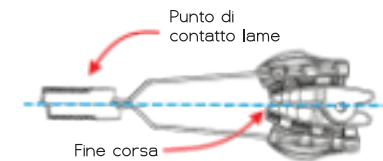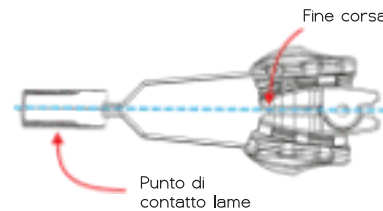

La posizione di contatto a chiusura delle lame deve essere sempre precedente al fine corsa del dispositivo.

In caso contrario lo sforzo del morso si scaricherà esclusivamente sui rapporti della slitta, causandone la rottura.



RISPETTA L'AMBIENTE!

In caso di deterioramento dei supporti in silicone inviare, al momento del riordino, una e-mail a:

tmdrelief@syde.technology

Inserendo un indirizzo di riferimento, un corriere sarà incaricato del ritiro.

In tal modo Syde S.r.l. potrà assicurare un limitato impatto ambientale grazie al riciclo e al riutilizzo previo ricondizionamento.

La salvaguardia dell'ambiente è importante e l'impiego consapevole delle risorse, limitando l'uso di energia e materiali, risulta fondamentale.

GRAZIE IN ANTICIPO PER IL SUPPORTO!



TMD Relief

Dispositivo medico per l'esercizio dei muscoli della bocca.



NON-STERILE
PERSONAL USE ONLY

Rev. 04 del 09/07/2019



- Contenuto della confezione:
- n. 1 Corpo in plastica TMD Relief
 - n. 2 Barre in acciaio con mordenti in silicone
 - n. 1 Chiave per regolazione
 - n. 1 Righello per la misurazione
 - n. 1 Laccetto di sicurezza



Syde s.r.l.
Via Leonardo da Vinci 16,
50132, Firenze - Tel. 0558873364
info@syde.technology
syde.technology
P.IVA: IT06538010486

News e tutorial

<https://bit.ly/32jGLa6>



Risorse scaricabili

<https://bit.ly/32j6Giz>



Ordini

<https://bit.ly/2JqV2dz>





TMD Relief


2015-2016-2017
Patented solution (EU)

Instrument for exercising of the muscles of the mouth.
Non Sterile Class 1 Medical Device.


REGULATION AND DISPOSAL (INSTRUCTIONS)

SETTING THE DEVICE


Unlock the locking grains.

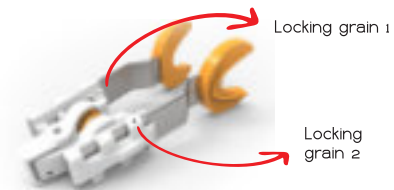

Close the blades.

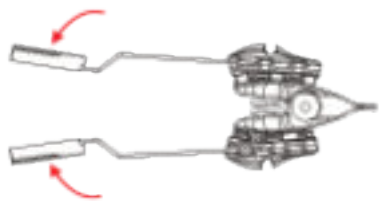

While keeping the device closed set the desired blades/sledges extension, to set the force/width by pulling/pushing the blades.

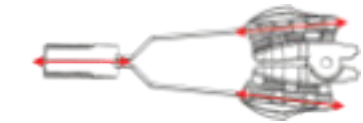

If a different "non forced width" regulation is required, twist one or both blades support sledges.






Lock the locking grains.



WARNING!

Wrong setting may result in ineffective exercise.

Wrong setting may damage the device by breaking the support sledges.

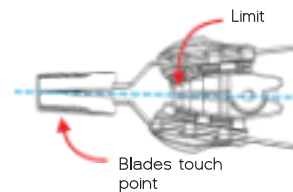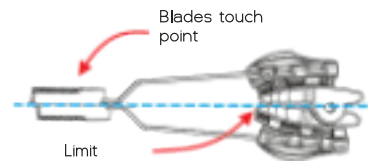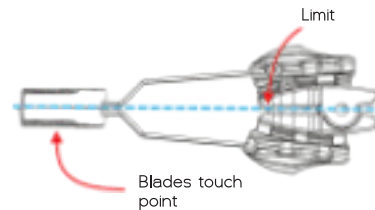

Blades must always touch before the limit position is reached or will result in forcing the sledges and damage of the device.



RESPECT THE ENVIRONMENT!

Once the silicon is worn, write to:

tmdrelief@syde.technology

We will retire the inox blades, after a specific treatment the blades will be reused saving energy and materials.

THANK YOU IN ADVANCE!



TMD Relief

Instrument for exercising of the muscles of the mouth.
Non sterile Class 1 Medical Device



NON-STERILE
PERSONAL USE ONLY

Rev. 04 09/07/2019



Package contents:
n. 1 TMD Relief body
n. 2 Inox blades with silica grips
n. 1 Allen key
n. 1 Ruler
n. 1 Safety strap



Syde s.r.l.
Via Leonardo da Vinci 16,
50132, Firenze - Tel. 0558873364
info@syde.technology
syde.technology
VAT: IT06538010486

News and tutorial

<https://bit.ly/3phFT0z>



Downloadable resurces

<https://bit.ly/3zj6Giz>



Order

<https://bit.ly/2JqV2dz>

